



CONTENU DES CARTONS

Plastique
 Comfy CCC100

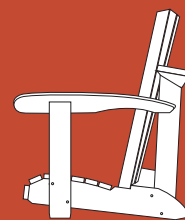


CARTON A


A | ASSISE

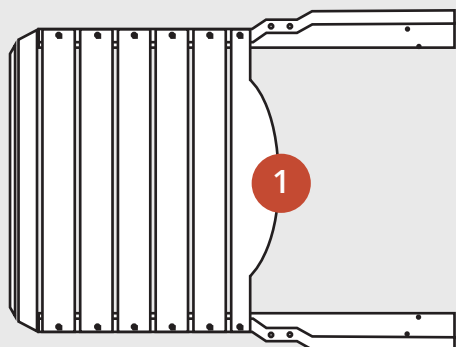

E1 | PIEDS AVANT

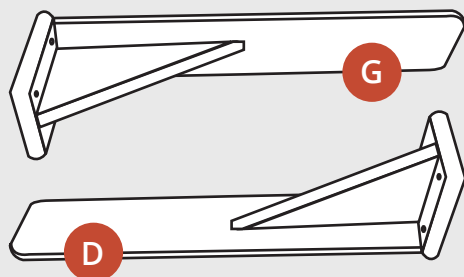


E2 | ACCOUDOIRS

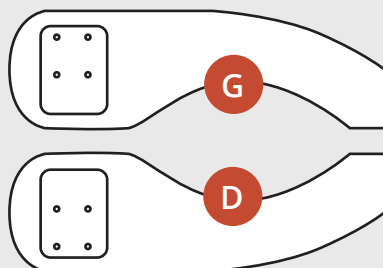


CARTON B


C | BARRE DE SOUTIEN DU DOSSIER

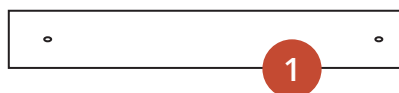


B | PIEDS ARRIÈRE

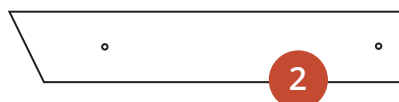

F | TRAVERSE AVANT

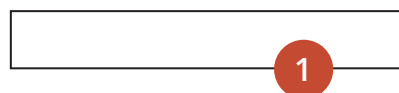

D | DOSSIER

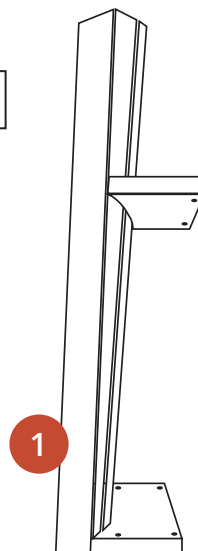

MATÉRIEL DE FIXATION

Boulons à tête bombée

8



8

Grandes vis

2




2

Petites vis

20

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Plastique
Comfy CCC100

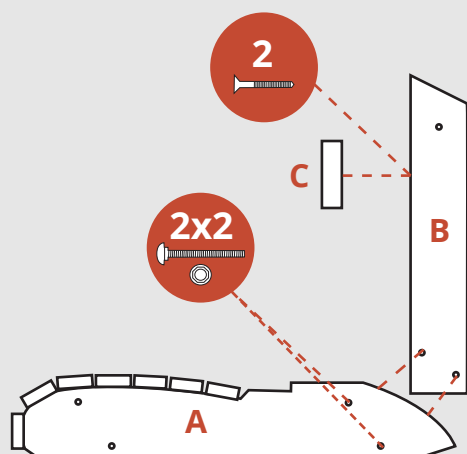


Avant de commencer

Vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces. Les pièces sont fournies dans deux cartons, **A** et **B**.


Étape 1 | Pieds arrière et barre C

- Prenez l'**assise A** et un **pied arrière B**, puis placez B à l'intérieur de A. Prenez deux boulons à tête bombée et insérez-les depuis l'extérieur de A dans les trous prépercés. Vissez les écrous sur les boulons. **Conseil** : Tapez légèrement sur la tête arrondie du boulon avec un marteau ou un autre objet dur. Cela empêchera le boulon de tourner lors du serrage de l'écrou. Repeat these steps on the other side of the chair.
- Répétez ces étapes de l'autre côté du fauteuil.
- Prenez la **barre C** et placez-la à l'avant des pieds arrière, au niveau des trous prépercés. Fixez C à l'aide de deux petites vis.

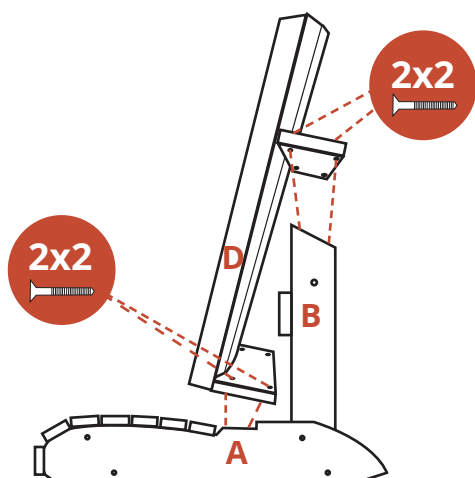

Étape 2 | Dossier

- Prenez le **dossier D** et placez-le dans l'encoche de l'assise.
- Fixez d'abord la partie supérieure de D aux pieds arrière B à l'aide de quatre petites vis, soit deux de chaque côté.
- Fixez ensuite la partie inférieure de D à l'assise A à l'aide de quatre petites vis.


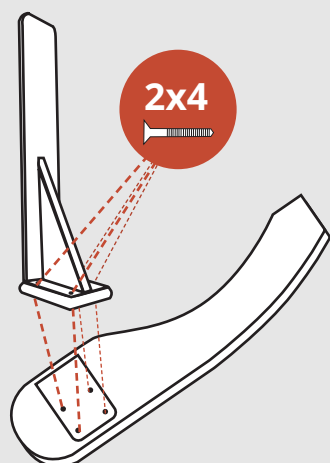


Étape 3 | Accoudoirs

- Prenez les éléments des accoudoirs **E1 et E2**.
- Associez le bon pied E1 au bon accoudoir E2. Pour cela, observez l'encoche située dans l'accoudoir. Faites attention aux angles arrondis et droits de l'encoche. Ils correspondent à la forme du pied E1. Le triangle doit être orienté vers l'extérieur.
- Fixez le pied à l'accoudoir à l'aide de quatre petites vis.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Plastique
Comfy CCC100

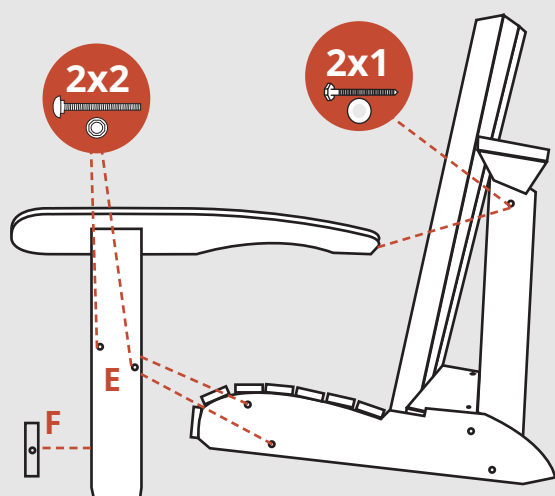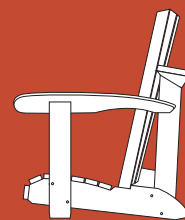

Étape 4 | Fixation des pieds avant

- Couchez le fauteuil sur le côté et prenez un pied avant E.
- Fixez le pied E à l'aide de deux boulons à tête bombée et de deux écrous.
- Fixez ensuite l'accoudoir au fauteuil à l'aide d'une grande vis et d'une rondelle.
- Répétez cette opération de l'autre côté du fauteuil.
- Installez la traverse F entre les pieds avant.

Terminé

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec vos fauteuils Comfy Chairs !